

GEBRAUCHS ANWEISUNG



G-WEG GmbH

Goethestraße 43
59555 Lippstadt

Telefon: 0 29 41/ 92 28 87

Telefax: 0 29 41/ 92 28 89

E-Mail: info@g-weg.com

Internet: www.g-weg.com

Wichtige Information zum G-WEG System! - Bitte unbedingt beachten -

Lieber G-WEG Kunde!

G-WEG® weist darauf hin, das Produkt G-WEG nicht zu waschen, sondern bei Flecken nur feucht mit lauwarmem Wasser abzuwischen. Unsere Empfehlung: Aufgrund von unterschiedlichen Desinfektionsmitteln an einer unauffälligen Stelle eine kleine Fläche Sprühdesinfektion testen. Vor Einrollen des G-WEGs das Desinfektionsmittel verdunsten lassen.

Es dürfen sich keine spitzen Gegenstände unter dem G-WEG befinden. Auf einen sicheren, geraden Untergrund ist zu achten (kein Teppichboden). Der G-WEG ist ausschließlich mit flachen, geschlossenen Schuhen zu begehen.

Eine Fixierung des Therapiemittels auf dem Untergrund (kleben, nageln, etc.) ist nicht zu empfehlen, da dies zu dauerhaften Schäden am Produkt führen kann.


Beim Transport und Einsatz nicht knicken, sondern waagrecht lagern!

Den Rollenkern entfernen, dieser muss nicht immer wieder mit aufgerollt werden!

Das Aufrollen des G-WEGs bitte wie folgt durchführen:

Ca. 20 cm der einen Seite umschlagen und dann erst mit dem Aufrollen beginnen.

(siehe Fotoreihe)

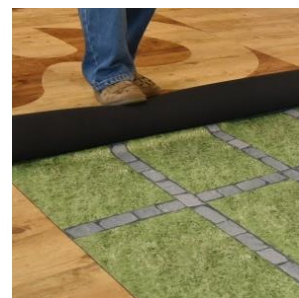

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Trainingserfolg mit dem G-WEG System!

G-WEG® GmbH
Geschäftsführende Gesellschafterin:
Ulla Schlösser
Geschäftsführerin: Mechthild Wiesemann

Bankverbindung:
Volksbank Beckum-Lippstadt eG
IBAN: DE59 4166 0124 0016 9130 00
BIC: GENODEM1LPS

Amtsgericht Paderborn HRB 13679
Sitz Lippstadt
UstID: DE 320 906 089
Steuer-Nr: 330/5713/2049